

## **ESTERILIZADORES COM BULE EM ALUMINIO**

- *Antes de ligar o esterilizador, verificar a tensão na etiqueta que se encontra no painel, também verificar a tomada aonde será ligada.*
- *Antes de ligar o aparelho, coloque a água .*
- *O esterilizador funciona com automático, sendo que ele liga e desliga automaticamente mantendo a temperatura da água, para desligar totalmente desligue da tomada.*
- *Sempre que atingir a temperatura desejada o termostato ira desligar apagando a lâmpada piloto, quando acesa estará em funcionamento.*
- *A limpeza do esterilizador e dos bules devera ser feita com água e sabão, para a parte de externa do esterilizador devera ser feita com um pano com álcool, sempre com o aparelho desligado.*